


PrevenCap®

2% de digliconato de clorexidina

Riohex 2% CHG

Tampa Protetora com CHG Alcoólica para Desinfecção de Conectores sem Agulha

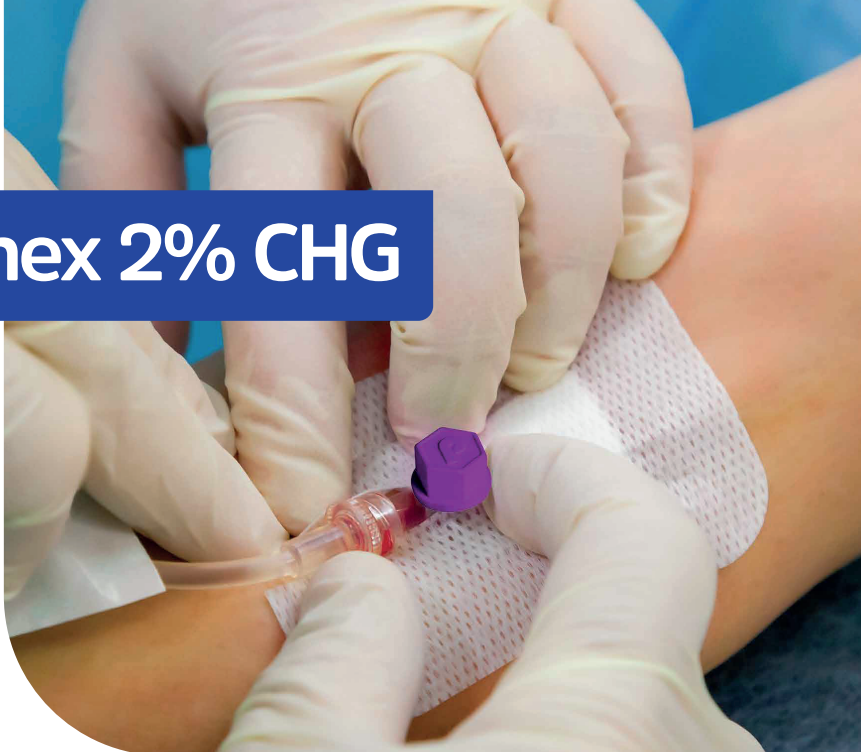

Resultado comprovados!

Elimina 99,999% dos 10 microrganismos mais presentes associados às (IRAS) Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde.


**EFICÁCIA
MICROBIOLÓGICA**

01 
MINUTO

Modo de Uso



Retire o PrevenCap® Riohex 2% CHG da fita;

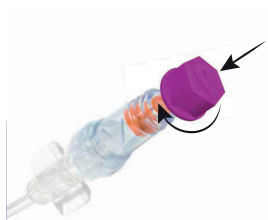

Conecte-o à válvula needle-free com pressão e rotação;



O PrevenCap® mantém a válvula desinfetada até ser removido;



Após remoção, descarte e substitua por um novo PrevenCap® Riohex 2% CHG.

Evite ameaças: PrevenCap funciona como agente desinfetante antes do acesso à linha e age como uma barreira física contra a contaminação.

Principais vantagens:

- **Acesso Imediato:** após 1 minuto de aplicação, o PrevenCap® Riohex 2% CHG permite acesso imediato ao conector sem necessidade de desinfecção extra;
- **Proteção Duradoura:** mantém o conector protegido e limpo por até 10 dias enquanto está aplicado;
- **Simplicidade de Uso:** dispensa a desinfecção manual, basta encaixar no conector, garantindo eficácia consistente;
- **Confirmação Visual:** a cor distintiva facilita a verificação visual e auditorias, promovendo conformidade com os protocolos.



LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 18.780.259/0001-68
Avenida das Juritis, 152, Paraíso (Polvilho) Cajamar/SP CEP: 0773-530

☎ 11 4448-3099 ✉ contato@labcomsaude.com.br 🌐 labcomsaude.com.br 📷 in labcomsaude

TAMPA SEXTAVADA PROTETORA DE CATETER VENOSO, LUER-LOCK, COM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA ALCOOLICA 2%

Código Supri: 1106500300500402

Registro: 80146019003
Procedência: Nacional



ESCANEE O QR CODE E CONFIRA A EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA