

Transforme sua experiência de banho no leito.

Touca para banho impregnada com shampoo e condicionador

TOUCAS SMART

Higienização dos cabelos com mais praticidade, conforto e bem-estar!



OTIMIZAÇÃO DE TEMPO com o procedimento.



PRONTO para uso.



REDUÇÃO DE GASTOS com lavanderia e insumos.



ROTINA SAUDÁVEL de higiene capilar.



DIMINUIÇÃO DE RISCOS com úlcera de decúbito e fungos, devido a umidade.



DISPENSA enxágue.

Diga adeus às toalhas e lençóis extras, jarras, bacias, shampoo, plásticos e algodão.

COMPOSIÇÃO

Água, cocoanfodiacetato dissódico, simeticona, glicerina, extrato de aloe, quaternium-15, metilparabeno, acetato de tocoferol, propilparabeno, hamamélis, dmdm hidantoina, perfume.

INSTRUÇÃO DE USO



Abra a embalagem no local indicado e retire a touca.



Coloque a touca na cabeça do paciente e cubra todo o cabelo, massageie-o com as pontas dos dedos por toda a superfície da touca de 2 a 5 minutos.



Retire a touca e, caso necessário, use uma toalha para secar ou retirar o excesso. Não é preciso lavar os cabelos após o uso. Descarte a touca.



A touca poderá ser usada na temperatura ambiente ou aquecida através do micro-ondas.



Abra a embalagem e a coloque no micro-ondas a uma potência de 700w por no máximo 20s. Cheque a temperatura antes de usar.

Implemente a inovação que cuida.



LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 18.780.259/0001-68
Avenida das Juritis, 152, Paraíso (Polvilho) Cajamar/SP CEP: 0773-530

☎ 11 4448-3099

✉ contato@labcomsaude.com.br

🌐 labcomsaude.com.br

📷 labcomsaude



ESCANEE O QR CODE E VEJA COMO UTILIZAR!

Código Supri: 11.065.006.003.0064-6 REGISTRO NO M.S.: 25351.083275/2024-05